

## 救護車輛及裝備器材消毒明細

一、車體以清潔劑刷洗、打臘，玻璃清潔劑刷洗，並防霧擦亮。

二、車門握把清洗再消毒。

三、車內部處理：先將車內東西搬出，清掃乾淨；內部噴灑消毒水，以清潔劑、漂白劑刷洗乾淨消毒晒乾（內含車體、司機座、後座椅、椅座箱、氧氣箱、器材櫃）。

### 四、救護醫療器材消毒明細：

1. 擔架床：消毒，清潔劑刷洗，後消毒晒乾。
2. 擔架床墊：（同右）
3. 擔架固定帶：清潔劑、漂白劑浸泡卅分鐘，沖淨後日光消毒。
4. 長背板：消毒、清潔劑、漂白劑刷洗，後消毒晒乾。
5. 頭頸固定器：消毒、清潔劑、漂白劑浸泡十分鐘，後日光消毒。
6. 長背板固定帶：清潔劑、漂白劑浸泡卅分鐘，沖淨日光消毒。
7. 鏟式擔架：消毒、清潔劑刷洗，後消毒晒乾。
8. 鏟式擔架固定帶：清潔劑、漂白劑浸泡卅分鐘，沖淨日光消毒。
9. 折疊式搬運椅：消毒、清潔劑刷洗，後消毒晒乾。
10. 搬運椅固定帶：清潔劑、漂白劑浸泡卅分鐘，沖淨日光消毒。
11. 頸圈：消毒、浸泡漂白水十五分鐘，沖淨日光消毒。
12. 約束帶：清潔劑、漂白劑浸泡卅分鐘，沖淨日光消毒。
13. 長短夾板：消毒、清潔劑刷洗，日光消毒。
14. 滅火器：潔淨、消毒、晾乾。
15. 抽吸器：潔淨、消毒、晾乾。
16. 固定式氧氣組：消毒、潔淨、晾乾。
17. 流量計（含瓶）：潔淨、消毒、吹乾。
18. 脫困器材：消毒、乾洗、消毒、晾乾。
19. 脫困器材袋：消毒、清潔劑、漂白劑浸泡卅分鐘，晒乾。
20. 手提式氧氣組：消毒、潔淨、消毒、晾乾。
21. 手提式氧氣盒：潔淨、噴消毒水、日光晒乾。
22. 急救箱：潔淨、噴消毒水、日光晒乾。
23. 繃帶剪：潔淨、浸泡消毒水、日光消毒。
24. 鑷子（有齒、無齒）：潔淨、浸泡消毒水、日光消毒。
25. 止血帶：潔淨、浸泡消毒水、日光消毒。

26.	鐘、吹乾。	彎盆：	潔淨、浸泡十分
27.	鐘、吹乾。	護目鏡：	潔淨、浸泡十分
28.	鐘、吹乾。	鼻咽呼吸道：	潔淨、浸泡十分
29.	鐘、吹乾。	口咽呼吸道：	潔淨、浸泡十分
30.	乾。	手電筒：	乾洗、消毒、晾
31.	乾。	聽診器：	乾洗、消毒、晾
32.	乾。	血壓計：	乾洗、消毒、晾
33.	乾。	甦醒球：	乾洗、消毒、晾
34.	日光曬乾。	甦醒球盒：	潔淨、噴消毒水、
35.		肛、腋體溫計：	消毒、晾乾。
36.	浸泡刷淨，消毒吹乾。	氧氣面罩：	清潔劑、漂白劑
37.	後消毒、晾乾。	抽氣式夾板：	先消毒、乾洗，
38.	漂白劑浸泡卅分鐘，沖淨曬乾。	抽氣式夾板袋：	消毒、清潔劑、
39.	浸泡沖洗乾淨，日光消毒。	毛毯：	清潔劑、漂白劑
40.	浸泡沖洗乾淨，日光消毒。	被單：	清潔劑、漂白劑
五、俟全部車體、器材乾後，組合放置歸位。			
附表 5-8			